

Концентратор кислорода

ОХУМАТ 3

Длительная кислородотерапия в домашних условиях

Наличие хронической дыхательной недостаточности и артериальной гипоксемии у пациентов с легочными заболеваниями значительно снижает продолжительность жизни. От 1 до 2% всех больных с легочной патологией нуждаются в проведении кислородотерапии. Суммарный предполагаемый эффект проведения длительной кислородотерапии у данной категории пациентов - продление жизни на 10-15 лет.

Чучалин А.Г. и соавт. Методические рекомендации по длительной кислородотерапии в домашних условиях



ОХУМАТ 3
с флоуметром
WM 13031



ОХУМАТ 3
с дозатором
WM 13011



вид изнутри



сервисная заглушка
(вид на прибор сзади)

Эффективность, надежность и удобство в эксплуатации:

- Высокая концентрация кислорода при всех режимах работы (95% O₂ при 1–4 л/мин, 90% при 5 л/мин);
- Точная настройка режима кислородотерапии с помощью дозатора или флоуметра;
- Самотестирование при запуске прибора
- Визуальные и акустические тревоги при нарушении работы прибора;
- Гарантия - 5 лет непрерывной работы;
- Сервисное обслуживание 1 раз в год или после 5000 часов непрерывной работы;
- Эргономичный, ударопрочный корпус;
- Низкое потребление электроэнергии;
- Очень низкий уровень шума (<40 дБ);
- Удобный счетчик часов эксплуатации материалов;

Названия приборов и их артикулы для заказа

Название	Артикул
ОХУМАТ 3 – концентратор кислорода с дозатором для взрослых	WM 13011
ОХУМАТ 3 – концентратор кислорода с дозатором для детей	WM 13021
ОХУМАТ 3 – концентратор кислорода с флоуметром для взрослых	WM 13031
ОХУМАТ 3 – концентратор кислорода с флоуметром для детей	WM 13041

1



2



3



4



Принадлежности

- 1 Дозатор с пузырьковым увлажнителем и 20 м шлангом**
Для взрослых с дозировкой 0,5–5 л / мин. (WM 13700)
Для детей с дозировкой 0,2–3 л / мин. (WM 13770)
- 2 Флоуметр**
Для взрослых с дозировкой 0,5–5 л / мин. (WM 13650)
Для детей с дозировкой 0,2–3 л / мин. (WM 13670)
- 3 Увлажнитель – WM 13730**
Для всех вариантов прибора, можно мыть в посудомоечной машине, подвергать дезинфекции и автоклавированию
- 4 OXYcontrol 2 – WM 13555**
Измерительный прибор для кислорода для быстрой и точной проверки концентрации O₂ в кислородных концентраторах
- 5 Адаптер для RESPIFLO/Kendall (WM 13755)**
без изображения

Полный ассортимент нашего оборудования, принадлежностей, масок для пациентов Вы найдете на Интернет-сайте www.weinmann.de

Технические данные OXYMAT 3



Габариты (Ш x В x Г):	400 x 700 x 350 мм	Мощность: ■ Значения после 10 минут эксплуатации. При +20 °C, 50% относительной влажности и 1013 мбар: 95 +1 / -3 об.-% O ₂ при 1 до 4 л / мин 90 ±3 об.-% O ₂ при 5 л / мин ■ Производительность на 2000 м над уровнем моря: 90 ±3 об.-% O ₂ при 5 л / мин
Вес:	около 20 кг	
Температура помещения ■ При эксплуатации: ■ При хранении:	с +10 °C до +40 °C с -20 °C до +70 °C	Индикатор потока: 0,5 до 5 л / мин (для взрослых) 0,2 до 3 л / мин (для детей)
Электроподключение:	230 В ~, 50 Гц	
Средняя электрическая мощность и потребление электроэнергии:	360 Вт; 1,6 А	Тревоги при сбоях: Акустические и оптические тревоги - концентрация кислорода (в соответствии с DIN EN ISO 8359) - отсоединение от сети - превышение температуры - недостаток или избыток давления - неточное измерение давления - ошибка памяти
Сетевой предохранитель:	T 2,5 A H 250 В в соответствии с DIN EN 60127-2	
Классификация по европейским нормам EN 60601-1 ■ Вид защиты от электрического удара: ■ Степень защиты от электрического удара:	класс защиты 2 тип B	Уровень шума: ≤ 40 дБ(A)
Электромагнитная совместимость ■ Защита от радиопомех: ■ Устойчивость при радиопомехах:	EN 55011 (VDE 0875 T.11) IEC 1000-4 часть 2 до 6 и 11	
Соответствие нормам продукции:	DIN EN ISO 8359	Исходное давление: 0,6 бар (60 кПа)
		Гарантия: пять лет на все функциональные детали с серийного номера 43.000
		Техобслуживание: 1 раз в год или после каждых 5000 часов работы

Контактные данные производителя:

Германия

Weinmann Gerate fur Medizin GmbH+Co.KG •
Postfach 540268 • 22502 Hamburg • Kronsaalsweg 40 • 22525 Hamburg •
E: info@weinmann.de • www.weinmann.de • T: 040-5 47 02-0

Офис в Санкт-Петербурге:

ООО «Вайнманн СПб» • Россия, 195027, Санкт-Петербург,
Свердловская наб.44, офис 302 • T: +7 (812) 633 30 82 •
Ф: +7 (812) 633 30 83 • E: A.Berezhnaya@ru.weinmann.de

Офис в Москве

T: (495) 237 28 47 • +7 (916) 927 85 86 • +7 (916) 637 35 33 •
E: x.orlowa@weinmann.de • n.borodina@weinmann.de